









Instructions for use



SmartSling®



Life Without Limitations®

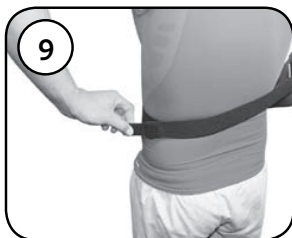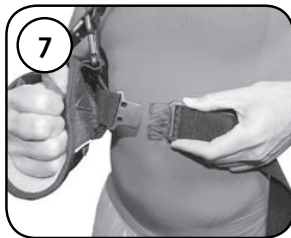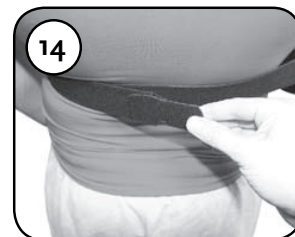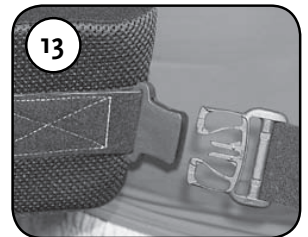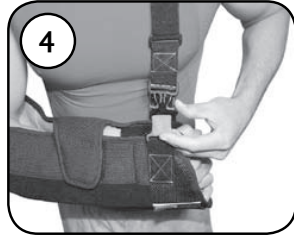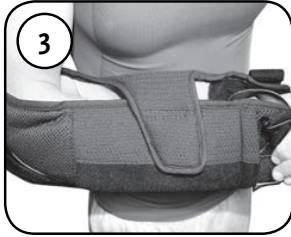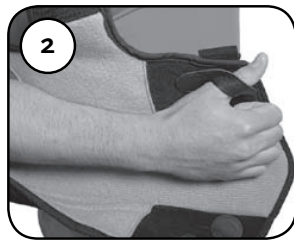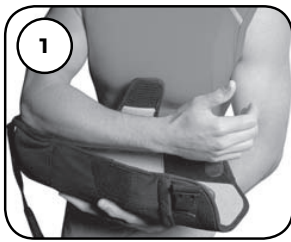

AVERTISSEMENT

Ce produit n'est qu'une écharpe de soutien. Il n'est pas conçu ni garanti pour prévenir les blessures. L'acheteur accepte ce qui suit :

- Ossur décline toute responsabilité en cas de blessures quelles qu'elles soient résultant de l'utilisation de produits Ossur.
- Lors de l'utilisation de ce type de dispositifs, il est possible de développer diverses irritations de la peau, notamment des érythèmes et des points de pression. En cas de réactions inhabituelles résultant de l'utilisation de ce produit, consultez votre fournisseur de soins de santé immédiatement.
- Si vous avez des questions sur l'adéquation de ce produit aux problèmes spécifiques dont vous souffrez, consultez votre fournisseur de soins de santé.
- **Si vous n'acceptez pas les conditions susmentionnées, contactez votre fournisseur de soins de santé avant d'utiliser ce produit.**

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE POSE

- 1 Pliez votre avant-bras selon un angle de 90° et placez-le dans l'écharpe SmartSling, en calant confortablement votre coude dans la poche angulaire de l'écharpe. Si nécessaire, le coussinet de coude installé peut être retiré pour un meilleur ajustement et un plus grand confort.
- 2 Passez votre pouce dans la bride de pouce. Cette dernière peut être repositionnée pour un meilleur ajustement et un plus grand confort.
- 3 Fermez le rabat supérieur pour fixer l'écharpe.
Remarque : La photo illustre la pose de l'écharpe sur bras droit. Pour poser l'écharpe sur votre bras gauche, fermez le rabat en le ramenant vers vous.
- 4 Passez-vous la sangle réglable autour de votre cou et fixez-la à la boucle à déclenchement rapide de l'écharpe.
- 5 Placez le coussinet de cou à gousset en peau de chamois à l'endroit qui vous semble le plus confortable.
- 6 Si nécessaire, réglez la sangle d'épaule à l'avant (représenté ci-contre) ou à l'arrière (non représenté). Si la sangle est trop longue, consultez la section **Découpage des sangles**.

IMMOBILISATION

- 7 Localisez la poche située sur le côté de l'écharpe plaqué contre votre corps. Fixez la sangle d'immobilisation à la boucle située dans la poche.
- 8 Passez la sangle d'immobilisation autour de votre dos et insérez-la dans la bride située sur l'extrémité coudée de l'écharpe.
- 9 Tirez la sangle d'immobilisation dans le sens opposé - de sorte qu'elle chevauche la section de sangle ceignant votre dos - et fixez-la confortablement à elle-même. Si la sangle est trop longue, consultez la section **Découpage des sangles**.

ABDUCTION

- 10 Fixez l'une des bandes de fixation double face fournies à la bride située sur le côté de l'écharpe plaqué contre votre corps.
- 11 Placez le coussin d'abduction entre votre corps et l'écharpe et fixez cette dernière au coussin à l'aide de la bande de fixation installée au cours de l'étape 1.
- 12 Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser le coussin d'aisselle pour bénéficier d'un soutien supplémentaire.
- 13 Passez la sangle du coussin d'abduction autour de votre dos et fixez-la au coussin d'abduction à l'aide de la boucle à déclenchement rapide située à l'avant du coussin.
- 14 La sangle du coussin d'abduction peut être réglée pour être correctement ajustée. Si la sangle est trop longue, consultez la section **Découpage des sangles**.

DÉCOUPAGE DES SANGLES

- 15 Toutes les sangles de l'écharpe SmartSling sont équipées de pinces crocodile facilitant leur découpage. Si une sangle est trop longue, il vous suffit de retirer une pince crocodile, de couper la sangle à la longueur souhaitée et de réinstaller la pince.

LAVAGE ET ENTRETIEN

L'écharpe SmartSling peut être nettoyée à la main avec un savon doux et de l'eau tiède. Suspendez-la pour la faire sécher. Ne placez pas l'écharpe SmartSling en machine ou dans un sèche-linge.

GARANTIE LIMITÉE

La présente garantie couvre tous les défauts de matière et vices de fabrication ou dysfonctionnements de votre nouvelle écharpe SmartSling pendant une période de 90 jours à compter de la date d'achat d'origine.

Ossur réparera ou remplacera, à sa discrétion exclusive, toute pièce défectueuse ou fonctionnant mal couverte par la garantie, et ce gratuitement. Les réparations requises en raison d'un accident, d'une négligence, d'une mauvaise utilisation de l'orthèse ou d'un abus de l'acheteur ne sont pas couvertes. De même, les dommages indirects ou accessoires ne sont pas recouvrables dans le cadre de la présente garantie. Ces limitations peuvent ne pas s'appliquer, certains états interdisant d'exclure ou de limiter les dommages indirects ou accessoires.

Pour toute demande de service dans le cadre de la présente garantie, veuillez contacter le département Inside Sales d'Ossur au (800) 222-4284 qui vous fournira un numéro d'autorisation de retour d'article. Une fois votre numéro d'autorisation de retour d'article obtenu, veuillez retourner votre écharpe SmartSling (en port prépayé) avec une description écrite sommaire du problème rencontré à l'adresse suivante : Ossur, 19762 Pauling, Foothill Ranch, CA 92610, États-Unis. **Veuillez noter votre numéro d'autorisation de retour d'article à l'extérieur du colis.** Les produits reçus sans numéro d'autorisation de retour d'article ne seront pas traités avant un délai de 2 semaines. Si le problème est couvert par la garantie, Ossur réparera le produit dans les meilleurs délais et vous le retournera. Si le problème n'est pas couvert par la garantie, Innovation Sports vous en informera et vous proposera de remédier si possible au problème en vous fournissant une estimation des coûts pour les pièces et la main-d'œuvre. Les réparations autorisées par l'acheteur d'origine seront effectuées et le produit lui sera retourné, le coût des réparations étant alors réglé contre remboursement ou débit d'une carte de crédit. Vous devez vous acquitter de tout frais dû dès réception du produit réparé. Si les réparations ne sont pas autorisées par l'acheteur d'origine, Ossur lui retournera le produit dans le même état que celui dans lequel la société l'a reçu. La présente garantie vous confère des droits juridiques spécifiques. D'autres droits qui varient selon l'état dans lequel vous résidez peuvent également vous être accordés.



GIBAUD
INNOVER POUR VOUS

Une société du groupe
ÖSSUR

CE N57-02/10