

BR403
V1-202003

En dehors de ces valeurs, veuillez nous consulter pour une mesure adaptée

HAUTEUR 8 cm
TALLE cm

1 2 3 4 5

27 - 35 31 - 39 35 - 43 39 - 47 43 - 51

17,5-20,5 20,5-23 23,5-26 26,5-29 29,5-32

CHAUSSETTE
du sol à
l'entrebombe
long > 37 cm
normal < 37 cm

ou plus fin de la cheville

ou plus large du mollet

GIBAUD
TISSEURS DE SOIN

www.gibaud.com

FABRIQUE EN FRANCE
DANS NOS ATELIERS DE TRÉVOUX

Tencel®TM, Polyamide, Elasthanne.
* Viscose

OEKO-TEX®
STANDARD 100
CERTIFIÉ EN TRÉVOUX
CQ 10291731
www.oeko-tex.com

MD CE

www.gibaud.com

GIBAUD

TISSEURS DE SOIN

À METTRE DÈS LE MATIN AU LEVER
Voir mise en place et enfilage à l'intérieur du pack

SOIN DES JAMBES

La femme
LA CHAUSSETTE

Chaussettes de compression
médicale pour la femme

GIBAUD
TISSEURS DE SOIN

GIBAUD

INDICATIONS
CLASSE 2 : 20,1 à 27 hPa (15,1 à 20 mmHg)
Pour les affections des jambes pouvant bénéficier d'une thérapie par compression, notamment dans les cas suivants :
• Post-opératoire & Post-sclérothérapie de veines variqueuses, diamètre veineux > 3 mm (C2).
• Symptômes veineux (douleur, inconfort, crampes) liés à la grossesse.
• Situations qui perturbent l'hémodynamique veineuse (vois longs, station debout prolongée, sport).

CONTRA-INDICATIONS
Le dispositif médical ne doit pas être porté par des personnes pour lesquelles la compression est contre-indiquée.
• Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec un index de pression systolique (IPS) < 0,6.
• Pilegmosia centralia dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle).
• Thrombose/Phlébite septique.
• Neuropathies et troubles de la sensibilité périphérique.
• Insuffisance cardiaque décompensée.
• Microangiopathie diabétique évoluée.

Voir précautions d'emploi et conseils d'entretien à l'intérieur du pack

GIBAUD

TISSEURS DE SOIN



matière d'environnement.

de repassage. Séchage à plat loin d'une source de chaleur (ni radiateur ni sèche-linge).

doivent le signaler au fabricant et à l'autorité compétente dans le pays concerné.

patients.

Ce dispositif ne doit être utilisé que sur un seul patient. Ne pas réutiliser sur plusieurs

douleur ou l'apparition de symptômes locaux, retirer le dispositif et contacter votre médecin.

Si le moindre problème survient pendant l'utilisation de ce dispositif, par exemple une

Le dispositif ne doit pas être placé en contact direct avec une lésion cutanée.

conception *Forma* / *Forma* design

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Si le moindre problème survient lors de l'application de ce dispositif, contactez votre

médecin. En cas de réclamation, merci de renvoyer le produit dans son emballage.

AVERTISSEMENTS

Si le moindre incident grave survient en lien avec le dispositif, l'utilisateur et/ou le patient

CONSEILS D'ENTRETIEN ET D'ÉLIMINATION DU DISPOSITIF

Lavage machine en programme délicat jusqu'à 40°C, sans adoucissant. Pas de lavage à sec ni

à la réglementation locale ou nationale en

1 et 2 - Retourner le produit sur lui-même
en pinçant le talon.
3 - Enfiler le pied jusqu'au talon en veillant
à ce que celui-ci soit bien en place.

4 - Dérouler régulièrement le produit le long
de la jambe en l'ajustant sans tirer, par des
mouvements légers de droite à gauche
afin d'éviter la formation de plis.
Masser la jambe de bas en haut pour aider
le textile à se mettre en place et gommer
les éventuels plis.



À METTRE DÈS LE MATIN AU LEVER

MISE EN PLACE

Pour faciliter la mise en place, nous vous
conseillons d'enfiler le produit sur
une peau bien sèche.