

En dehors de ces valeurs, veuillez nous consulter pour une mesure adaptée

HAUTEUR TAILLE en cm

1	2	3	4	5
27-35	31-39	35-43	39-47	43-51

ou plus large du mollet

ou plus fin de la cheville

CHAUSSETTE du sol au pli

long > 45 cm

normal < 45 cm

GIBAUD TISSEURS DE SOIN

www.gibaud.com

FABRIQUE EN FRANCE
DANS NOS ATeliers DE TExOUX
Viscosse

Tencel® Polymide, Elasthanne.

CE MD

ASQUAL

www.asqual.com

Feels so right

OEKO-TEX®
STANDARD 100
CERTIFIED BY TESTEK

www.testek.com

BR401
V1-202006

GIBAUD

TISSEURS DE SOIN



SOIN DES JAMBES

L'homme LA CHAUSSETTE FINE

Chaussettes de compression médicale pour l'homme



GIBAUD

GIBAUD

TISSEURS DE SOIN

INDICATIONS
CLASSE 2 : 20,1 à 27 hPa (1,5, 1 à 20 mm-Hg)
Pour les affections des jambes pouvant bénéficier d'une thérapie par compression, notamment dans les cas suivants :
• Post-opératoire & Post-sclérothérapie de veines variqueuses, diamètre veineux > 3 mm (C2).
• Situations qui perturbent l'hémodynamique veineuse (vois longs, station debout prolongée, sport).

CONTRE-INDICATIONS
Le dispositif médical ne doit pas être porté par des personnes pour lesquelles la compression est contre-indiquée. • Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec un index de pression systolique (IPS) < 0,6 • Pylgmosia centica dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle). • Thrombose/Phlébite septique. • Neuropathies et troubles de la sensibilité périphérique. • Insuffisance cardiaque décompensée. • Microangiopathie diabétique évoluée.

Voir précautions d'emploi et conseils d'entretien à l'intérieur du pack

À METTRE DÈS LE MATIN AU LEVER
Voir mise en place et enfilage à l'intérieur du pack



conception *Forma* / *Forma* design

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Si le moindre problème survient lors de l'application de ce dispositif, contactez votre médecin. En cas de réclamation, merci de renvoyer le produit dans son emballage.

AVERTISSEMENTS

Le dispositif ne doit pas être placé en contact direct avec une lésion cutanée.

Si le moindre problème survient pendant l'utilisation de ce dispositif, par exemple une douleur ou l'apparition de symptômes locaux, retirer le dispositif et contacter votre médecin. Ce dispositif ne doit être utilisé que sur un seul patient. Ne pas réutiliser sur plusieurs patients.


Si le moindre incident grave survient en lien avec le dispositif, l'utilisateur et/ou le patient doivent le signaler au fabricant et à l'autorité compétente dans le pays concerné.

CONSEILS D'ENTRETIEN ET DÉLIMITATION DU DISPOSITIF

Lavage machine en programme délicat jusqu'à 40°C, sans adoucissant. Pas de lavage à sec ni de repassage. Séchage à plat loin d'une source de chaleur (ni radiateur ni sèche-linge). Jeter le dispositif et son emballage conformément à la réglementation locale ou nationale en matière d'environnement.

1 et 2 - Retourner le produit sur lui-même en pinçant le talon.
3 - Enfiler le pied jusqu'au talon en veillant à ce que celui-ci soit bien en place.

4 - Dérouler régulièrement le produit le long de la jambe en l'ajustant sans tirer, par des mouvements légers de droite à gauche afin d'éviter la formation de plis.
Masser la jambe de bas en haut pour aider le textile à se mettre en place et gommer les éventuels plis.

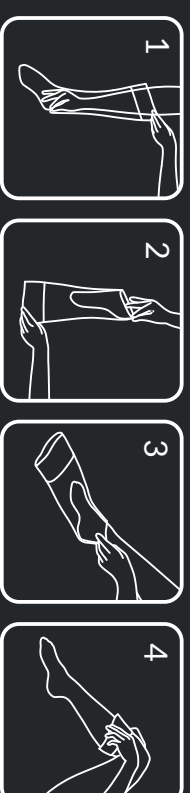

À METTRE DÈS LE MATIN AU LEVER

MISE EN PLACE

Pour faciliter la mise en place, nous vous conseillons d'enfiler le produit sur une peau bien sèche.