

GIBAUD

Reflets

OPACITÉ



PR13016
V2_202105

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Si le moindre problème survient lors de l'application de ce dispositif, contactez votre médecin. En cas de réclamation, merci de renvoyer le produit dans son emballage.

AVERTISSEMENTS

Le dispositif ne doit pas être placé en contact direct avec une lésion cutanée.

Si le moindre problème survient pendant l'utilisation de ce dispositif, par exemple une douleur ou l'apparition de symptômes locaux, retirer le dispositif et contacter votre médecin.

Ce dispositif ne doit être utilisé que sur un seul patient. Ne pas réutiliser sur plusieurs patients.

Si le moindre incident grave survient en lien avec le dispositif, l'utilisateur et/ou le patient doivent le signaler au fabricant et à l'autorité compétente dans le pays concerné.

CONSEILS D'ENTRETIEN ET D'ÉLIMINATION DU DISPOSITIF

Lavage machine en programme délicat jusqu'à 40°C, sans adoucissant. Pas de lavage à sec ni de repassage. Séchage à plat loin d'une source de chaleur (ni radiateur ni sèche-linge).

Jeter le dispositif et son emballage conformément à la réglementation locale ou nationale en matière d'environnement.



INDICATIONS

CLASSE 1 : 13 à 20 hPa (10 à 15 mmHg)
Les dispositifs sont destinés aux patients, pouvant bénéficier d'une thérapie par compression, mais ayant une faible tolérance aux dispositifs de classe de compression élevée.

CLASSE 2 : 20,1 à 27 hPa (15,1 à 20 mmHg)

Pour les affections des jambes pouvant bénéficier d'une thérapie par compression, notamment dans les cas suivants :

- Post-opératoire & Post-sclérotérapie de veines variqueuses, diamètre veineux > 3 mm (C2).
- Symptômes veineux (douleur, inconfort, crampes) liés à la grossesse.
- Situations qui perturbent l'hémodynamique veineuse (vois longs, station debout prolongée, sport).

SOIN DES JAMBES

Reflets
OPACITÉ

MI-BAS
BAS OU COLLANT

FABRIQUÉ EN FRANCE
DANS NOS ATELIERS DE TRÉVOUX



Compression médicale pour la femme

GIBAUD
TISSEURS DE SOIN

INDICATIONS

CLASSE 3 : 27,1 à 48 hPa (20,1 à 36 mmHg)
Pour les affections des jambes pouvant bénéficier d'une thérapie par compression, notamment dans les cas suivants :

- Veines variqueuses, diamètre veineux > 3 mm (C2).
- Post-opératoire & Post-sclérotérapie de veines variqueuses, diamètre veineux > 3 mm (C2).
- Œdème veineux chronique (C3).
- Troubles trophiques (pigmentation et eczéma) (C4a), chroniques (lipodermatosclérose, hypodermite veineuse, et atrophie blanche) (C4b chronique), avec ulcère veineux cicatrisé (C5).
- Traitement de la thrombose veineuse superficielle du membre inférieur.
- Traitement de la thrombose veineuse profonde en phase aiguë.
- Prévention du syndrome post-thrombotique.
- Lymphoedème.

CONTRE-INDICATIONS


Le dispositif médical ne doit pas être porté par des personnes pour lesquelles la compression est contre-indiquée.

- Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec un index de pression systolique (IPS) < 0,6.
- Phlegmasia cerulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle).
- Thrombose/Phlébite septique.
- Neuropathies et troubles de la sensibilité périphérique.
- Insuffisance cardiaque décompensée.
- Microangiopathie diabétique évoluée.

En dehors de ces valeurs, veuillez nous consulter.

HAUTEUR	TAILLE en cm	1	2	3	4	5
FEMME	Du sol à l'entrejambe	56 - 60	61 - 66	66 - 70	71 - 75	76 - 80
	COLLANT ou BAS long : > 75 normal : < 75	40 - 55	45 - 60	50 - 65	55 - 70	60 - 75
		ou plus large de la cuisse				
MI-BAS ou CHAUSSETTE	Du sol au pli du genou long : > 37 normal : < 37	36 - 39	40 - 43	44 - 47	48 - 51	52 - 55
		27 - 35	31 - 39	35 - 43	39 - 47	43 - 51
		ou plus large du mollet				
		17,5-20,5	20,5-23	23,5-26	26,5-29	29,5-32
		ou plus fin de la cheville				

⊕ Mesures plus disponibles pour certaines gammes.

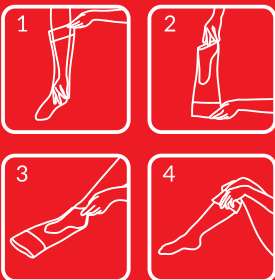

À METTRE DÈS LE MATIN AU LEVER
MISE EN PLACE

Pour faciliter la mise en place, nous vous conseillons d'enfiler le produit sur une peau bien sèche.

- 1 et 2 - Retourner le produit sur lui-même en pinçant le talon.
 - 3 - Enfiler le pied jusqu'au talon en veillant à ce que celui-ci soit bien en place.
 - 4 - Dérouler régulièrement le produit le long de la jambe en l'ajustant sans tirer, par des mouvements légers de droite à gauche afin d'éviter la formation de plis.
- Masser la jambe de bas en haut pour aider le textile à se mettre en place et gommer les éventuels plis.

Reflets Opacité mi-bas, bas ou collant classe 1, 2 & 3 : Polyamide, Élasthane.



www.gibaud.com



GIBAUD
TISSEURS DE SOIN