

SL

STANDARDNI 0°/20° LAHKA OPORNICA

Če imate kakršnekoli dvome v zvezi z namestitevijo in uporabo tega medicinskega priponočka, se posvetujte z osebnim zdravnikom in/ali ortopedom/ortoteknikom, farmacevtom ali ortopedskim svetovalcem.

INDIKACIJE

Za stanja, ki jim lahko koristi imobilizacija kolena, zlasti v naslednjih primerih:
 • poškodbe kolena,
 • urgentna imobilizacija,
 • imobilizacija kolena pred operacijo ali po njej.

DELOVANJE

Priponoček omogoča omejitev gibanja kolenskega sklepa ali relativna imobilizacija.

KONTRAINDIKACIJE

Znane niso nobene kontraindikacije.

OPOZORILA • PREVIDNOSTNI UKREPI

Opornice ne smemo uporabljati v primerih, ko je zaradi poškodbe potrebna popolna imobilizacija ali kirurški poseg.

Priponočka ne smete nositi dlje časa brez medicinskega nadzora.

Opornicu ne smemo namestiti tako, da je v neposrednem stiku s poškodovano kožo.

Ta opornica je priponoček, ki ga lahko uporablja le en bolnik. Ne uporabljajte ga pri več bolnikih.

Ko nastavljate trake, jih morate zategniti tako, da se priponoček tesno prilega, vendar vam je udobno.

Če se med uporabo te opornice pojavi kakršnaki težava, na primer bolečina ali znaki lokalnega draženja, priponoček odstranite in se posvetujte z zdravstvenim delavcem.

Ce pride do kakršnegakoli resnega zapleta, povezanega s tem priponočkom, morata zdravstveni delavec in/ali bolnik o tem obvestiti proizvajalca in pristojni organ v zadevnih državah.

LASTNOSTI PRIPOONOČKA

Par odstranjivih stranskih kovinskih zadrževalnikov (upogibanje 0° ali 20°)
 2 hrbtna zadrževalnika (1 za velikost TO)
 1 trak za pozicioniranje
 4 polkrožni trakovi

MERJENJE IN PREGLEDNICA VELIKOSTI

Velikost ortoze izberemo glede :

- na dolžino od 1/3 stegna zgoraj do 1/3 meč spodaj na nogi, ki jo je treba imobilizirati (v cm). (B)
- na obseg stegna 20 cm nad pokrovčkom kolena (v cm). (A)

	TO	T1	T2	T3	T4
A	30	50	50	60	60
B	30-40	45-55	55-65	45-55	55-65

