

GIBAUD

TISSEURS DE SOIN

GIBAUD

Chaussettes de compression
médicale pour la femme

GIBAUD
TISSEURS DE SOIN

La femme
LA CHAUSSETTE

SOIN
DES JAMBES



À METTRE DÈS LE MATIN AU LEVER
Voir mise en place et enfilage à l'intérieur du pack

GIBAUD

TISSEURS DE SOIN


La femme La chaussette classe 2 :
Tencel®, Polyamide, Elasthanne.
*Viscose

FABRIQUÉ EN FRANCE
DANS NOS ATELIERS DE TREVOUX

www.gibaud.com



GIBAUD
TISSEURS DE SOIN

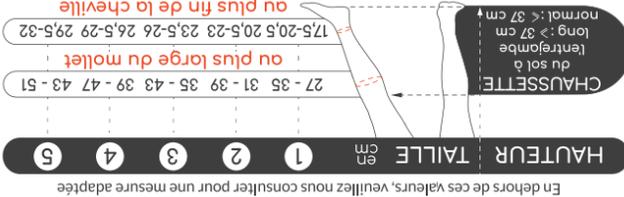

NBR403-V3-202209

INDICATIONS

CLASSE 2 : 20,1 à 27 hPa (15,1 à 20 mmHg)
Pour les affections des jambes pouvant bénéficier d'une thérapie par compression, notamment dans les cas suivants :
• Post-opératoire & Post-sclérothérapie de veines variqueuses, diamètre veineux > 3 mm (C2).
• Symptômes veineux (douleur, inconfort, crampes) liés à la grossesse.
• Situations qui perturbent l'hémodynamique veineuse (vois longs, station debout prolongée, sport).

CONTRE-INDICATIONS

Le dispositif médical ne doit pas être porté par des personnes pour lesquelles la compression est contre-indiquée.
• Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec un index de pression systolique (IPS) < 0,6.
• Phlegmasia cerulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle).
• Thrombose/Phlébite septique.
• Neuropathies et troubles de la sensibilité périphérique.
• Insuffisance cardiaque décompensée.
• Microangiopathie diabétique évoluée.

Voir précautions d'emploi et conseils d'entretien à l'intérieur du pack

