


GIBAUD

Reflets

FINESSE

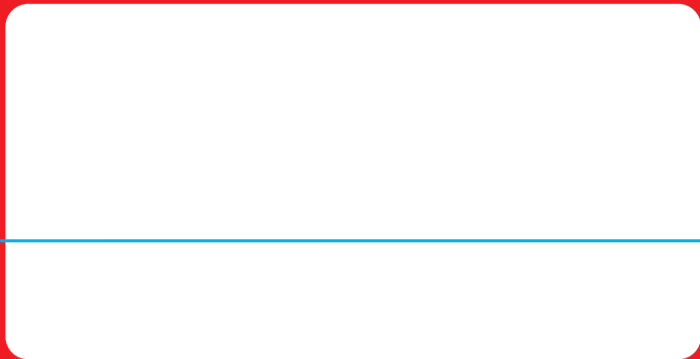

NPR13007
V4_202210

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Si le moindre problème survient lors de l'application de ce dispositif, contactez votre médecin. En cas de réclamation, merci de renvoyer le produit dans son emballage.

AVERTISSEMENTS

Le dispositif ne doit pas être placé en contact direct avec une lésion cutanée.

Si le moindre problème survient pendant l'utilisation de ce dispositif, par exemple une douleur ou l'apparition de symptômes locaux, retirer le dispositif et contacter votre médecin.

Ce dispositif ne doit être utilisé que sur un seul patient. Ne pas réutiliser sur plusieurs patients.

Si le moindre incident grave survient en lien avec le dispositif, l'utilisateur et/ou le patient doivent le signaler au fabricant et à l'autorité compétente dans le pays concerné.

CONSEILS D'ENTRETIEN ET D'ÉLIMINATION DU DISPOSITIF

Lavage machine en programme délicat jusqu'à 40°C, sans adoucissant. Pas de lavage à sec ni de repassage. Séchage à plat loin d'une source de chaleur (ni radiateur ni sèche-linge).

Jeter le dispositif et son emballage conformément à la réglementation locale ou nationale en matière d'environnement.



INDICATIONS

CLASSE 2 : 20,1 à 27 hPa (15,1 à 20 mmHg)

Pour les affections des jambes pouvant bénéficier d'une thérapie par compression, notamment dans les cas suivants : • Post-opératoire & Post-sclérothérapie de veines variqueuses, diamètre veineux > 3 mm (C2). • Symptômes veineux (douleur, inconfort, crampes) liés à la grossesse. • Situations qui perturbent l'hémodynamique veineuse (vols longs, station debout prolongée, sport).

CONTRE-INDICATIONS

Le dispositif médical ne doit pas être porté par des personnes pour lesquelles la compression est contre-indiquée. • Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec un index de pression systolique (IPS) < 0,6. • Phlegmasia cerulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle). • Thrombose/Phlébite septique. • Neuropathies et troubles de la sensibilité périphérique. • Insuffisance cardiaque décompensée. • Microangiopathie diabétique évoluée.

Bas avec silicone : pour un bon usage des bas avec antiglisse silicone, il est recommandé de les laver tous les jours afin de préserver les qualités d'adhérence du silicone.

Reflets Finesse mi-bas, bas ou collant classe 2 : Polyamide, Élasthanne.

www.gibaud.com



GIBAUD

Reflets
FINESSE

MI-BAS
BAS OU COLLANT

FABRIQUÉ EN FRANCE
DANS NOS ATELIERS DE TRÉVOUX



Compression
médicale
pour la femme



GIBAUD

GIBAUD

En dehors de ces valeurs, veuillez nous consulter.

HAUTEUR

TAILLE

en cm

1

2

3

4

5

FEMME

Du sol à l'entrejambe
COLLANT ou BAS
long : >75 cm
normal : <75 cm

40 - 55 45 - 60 50 - 65 55 - 70 60 - 75

ou plus large de la cuisse

Du sol au pli du genou
MI-BAS
long : >37 cm
normal : <37 cm

27 - 35 31 - 39 35 - 43 39 - 47 43 - 51

ou plus large du mollet

17,5-20,5 20,5-23 23,5-26 26,5-29 29,5-32

ou plus fin de la cheville



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
**À METTRE DÈS LE MATIN AU LEVER
MISE EN PLACE**

Pour faciliter la mise en place, nous vous conseillons d'enfiler le produit sur une peau bien sèche.

1 et 2 - Retourner le produit sur lui-même en pinçant le talon.
3 - Enfiler le pied jusqu'au talon en veillant à ce que celui-ci soit bien en place.

4 - Dérouler régulièrement le produit le long de la jambe en l'ajustant sans tirer, par des mouvements légers de droite à gauche afin d'éviter la formation de plis.

Masser la jambe de bas en haut pour aider le textile à se mettre en place et gommer les éventuels plis.



C P C
SAINT-ETIENNE

CLIENT: GIBAUD

PRODUIT: Reflets
Finesse

RÉFÉRENCE:
NPR13007_V4_202210

INDICE:

COULEURS UTILISÉES:

- Cyan
- Magenta
- Yellow
- Black
- PANTONE 2347 C
- DECOUPE CPC

DATE:

12/10/2022

VALIDATION